

No coma ni beba ni mastique goma de mascar durante por lo menos 15 minutos antes de hacer la prueba. Espere 30 minutos después de usar productos para la higiene bucal.

## Paso 1 - Tome la muestra

Pase una vez el hisopo sobre la encía superior y la inferior. NO pase el hisopo por el paladar, las mejillas ni la lengua.




## Paso 2 - Haga la prueba

Inserte el dispositivo en la solución tapón. Inicie el cronometro.




## Paso 3 - Lea el resultado

Deje que se procese durante 20 minutos. NO lea el resultado después de 40 minutos.

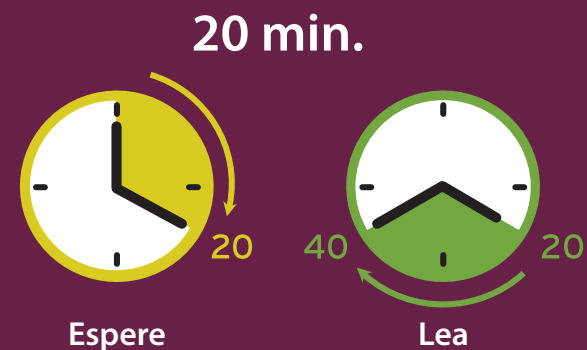

**Positivo:**  
Líneas en la zona C y en la T

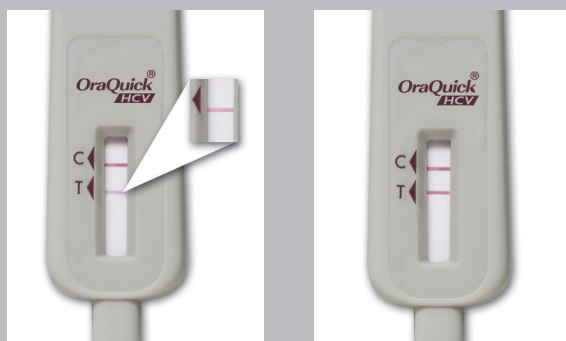

Una línea en la zona C (aunque sea pálida) significa que la prueba es positiva. Comuníquese con un centro de atención médica para que le hagan una prueba de confirmación.

**No positivo:**  
Una línea en la zona C  
No se detectaron anticuerpos para el virus de la hepatitis C.



Una línea en la zona C y ninguna línea en la zona T significa que la prueba no es positiva.

**Sin validez:**  
Repetir la prueba



Un resultado sin ninguna línea o un fondo rojo significa que la prueba no funcionó. Repita la prueba con un dispositivo nuevo.